


オストメイトの方が、パウチやストーマ（人工肛門）の回りを洗うための設備です

シングルレバー水栓

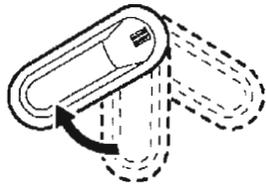

レバーハンドルを上に出ると、カランから水が出ます。右側に回すと水、左側に回すにつれて温度が上がります。
※左側いっぱい回すと、最高温度（約36℃）になります。




最高温度（約36℃）



お湯がポタポタと出ることがありますが、電気温水器の膨張水ですので異常ではありません。また、やけどの心配はありません。※これを使用することはありません。

※図はLタイプの例です

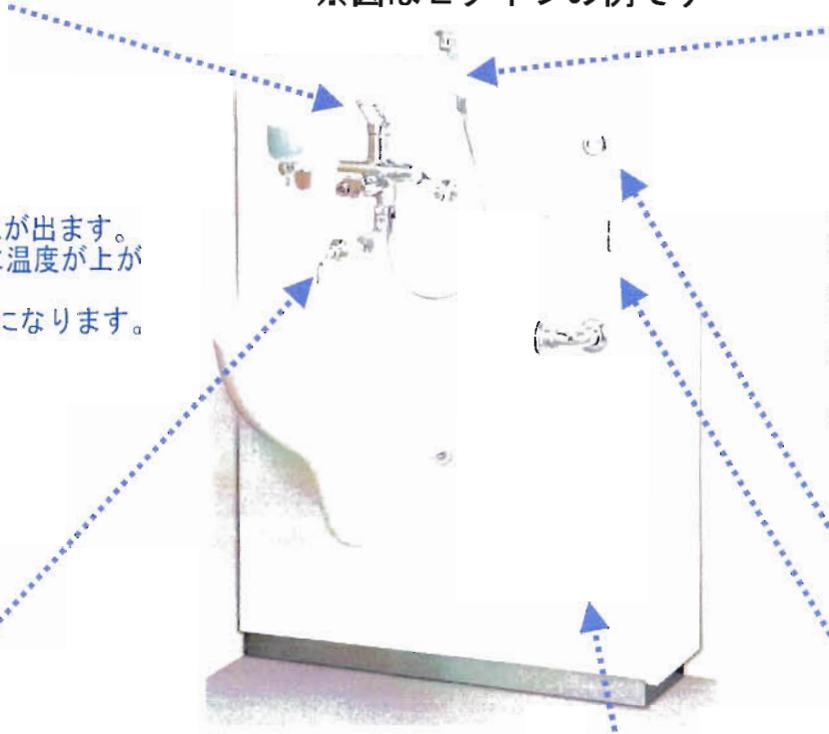

シャワー



ストーマ（人工肛門）の回りを洗うときに使います。ボタンを押している間は水が出て、離すと止まります。

- ご使用前に、10秒程度湯を流して、水栓内部をリフレッシュしてください。
- ご使用の際は、水栓のレバーハンドルを上げ、必ずシャワーを持った状態で開閉ボタンの操作を行ってください。
- 使用後は必ず、水栓のレバーハンドルを閉め、フックにかけてください。

タッチスイッチ



紙巻器

汚物流し

汚物を流したり、パウチを洗うための器具です。
●汚物流しには、汚物と備え付けのトイレットペーパー以外流さないでください。詰まって流れなくなるおそれがあります。



汚物流しを洗浄するスイッチです。ボタンを押すと流れます。